

آترین®

محصولات طبی

# ATRIN MEDICAL PILLOW

ORGANIC  
CHERRY  
STONES



**THERMOTHERAPY**

• HEAT IN THE MICROWAVE • COOL IN THE FREEZER

%100  
NATURAL

با لشتک طبی آترین

# با لشتک طبی آترین

با لشتک طبی آترین برآمده از دل طبیعت، با استفاده از هسته های ارگانیک و فرآوری شده گیلاس (خانواده Cerasus) و پوششی مخصوص از الیاف طبیعی کتان، جهت گرمادرمانی، کمپرس سرد و رایحه درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

هسته های گیلاس نابارور با استفاده از ماشین آلات پیشرفته مراحل غبارزدایی، شستشو و خشک شدن را طی نموده و سپس وارد مرحله نهایی فرآوری می گردند و پس از چندین مرحله فرآیندهای مکانیزه، هسته های فرآوری شده گیلاس قابلیت ویژه نگهداری و رهاسازی گرما و سرما را خواهند یافت.

هسته های ارگانیک و فرآوری شده گیلاس درون پوششی از الیاف طبیعی کتان بسته بندی شده و با لشتک طبی آترین آماده استفاده در هر نوع مایکروویو و فریزر می گردد و به دفعات نامحدود می توان آن را گرم یا سرد و شستشو نمود.

## گرمادرمانی

کافیست بالشتک طبی آترین را به مدت ۳ دقیقه درون مایکروویو با توان ۷۰۰ وات (یا بالاترین درجه مایکروویو) و یا درون ظروف مخصوص نسوز در اجاق گازهای معمولی به مدت ۱۵ دقیقه قرار داده، تا از گرمای مطبوع و ماندگار آن برای حداقل ۴۵ دقیقه بهره مند شوید، همچنین در صورت عدم دسترسی به مایکروویو یا اجاق گاز، می توان از دیگروسیل گرمایشی نظیر شوفاژ یا بخاری (بارعایت احتیاط های جانبی) جهت گرم کردن بالشتک طبی آترین استفاده نمود.

گرمای نفوذ یافته به هسته های ارگانیک و فرآوری شده گیلاس در بالشتک طبی آترین، پس از تماس و فرم گرفتن با هر کدام از اعضای بدن، به آن عضو منتقل شده و گرمای طولانی آن باعث التیام و تسکین سریع درد و ناراحتی می گردد.

گرفتگی های عضلانی، درد مفاصل، کشیدگی گردن، کمردرد، آرتروز، دیسک کمر، دردهای قاعدگی، سردرد، کرامپ معده، دل دردهای کولیکی شیرخواران، سینوزیت، رگ به رگ شدن، سرمازدگی، روماتیسم و درد زانو همگی با استفاده از گرمای آرامش بخش بالشتک طبی آترین تسکین می یابند.

یکی از مزایای استفاده از بالشتک طبی آترین نسبت به کیسه های آب گرم، عدم خطر سوختگی و تاول زدن بوده و همچنین چون برخلاف کیسه های آب گرم سردتر از دمای محیط نمی شود، هرگز احساس سرد شدن و رطوبت برای مصرف کننده ایجاد نمی کند.

همچنین بالشتک طبی آترین برای افراد مسن و کودکان جهت گرم نمودن بستر خواب در شبهای سرد زمستان و نیز گرم کردن دستها و پاها بسیار ایده آل می باشد.

## کمپرس سرد

بالشتک طبی آترین را می توان به عنوان کمپرس سرد استفاده نمود. کافیت آن را درون یک کیسه پلاستیکی (جهت خشک نگه داشتن) و به مدت حداقل ۴۵ دقیقه در فریزر قرار داده، سپس از آن به عنوان کمپرس سرد در بهبود آسیب دیدگی و کبودی ورزشکاران، التهاب محل گزش حشرات و تب بهره برد.

## رایحه درمانی

با توجه به قابل شستشو بودن بالشتک طبی آترین، استفاده از آن در رایحه درمانی (آروماتراپی) بسیار ایده آل می باشد. هسته های حرارت دیده گیلان اگرچه عطر دلپذیر طبیعی دارند، اما می توان پس از گرم نمودن بالشتک طبی آترین در مایکروویو، در هر نوبت چند قطره از مواد روغنی و معطر مورد نظر را با آب مخلوط و سپس بالشتک طبی آترین را به آن آغشته نموده و روی موضع آسیب دیده قرار داد و یا آن را استنشاق کرد. به عنوان مثال رایحه لاوندر برای کمک به آرامش و تسکین استرس و یا اکالیپتوس جهت بهبود سرماخوردگی و گرفتگی بینی توصیه می گردد.

## دیگر مزایای بالشتک طبی آترین

### قابل شستشو بودن

قابلیت منحصر به فرد بالشتک طبی آترین نسبت به دیگر بالشتکهای مشابه طبیعی (مثل بالشتکهای گندم، برنج و ...) این است که دچار پوسیدگی و فساد نمی شود و نیز می توان آن را به دفعات مورد شستشو قرار داد. کافیت آن را مستقیماً درون کیسه محافظ پارچه ای دیگری گذاشته (به منظور اطمینان بیشتر جهت جلوگیری از پاره شدن پارچه بالشتک) و در ماشین لباسشویی با آب حدود ۴۰ درجه سانتیگراد قرار داد.

### گرمای طولانی

هسته های گیلان نسبت به سایر موارد مشابه طبیعی (گندم، برنج و ...) بزرگتر بوده و گرما را برای مدت زمان طولانی تری نگهداری می نمایند. این ویژگی سبب می گردد تا بالشتک طبی آترین در مقایسه با سایر بالشتکهای مشابه گرمای بیشتر و طولانی تری داشته باشد.

### بدون حساسیت و آلرژی

سایر بالشتک های مشابه طبیعی، از خود ذرات ریز و عوامل قارچ زا خارج می کنند و هرچه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، بیشتر آسیب دیده و ذرات ریز آنها در هوا پراکنده می شوند که منجر به بیماری های سینوسی و آلرژی ها می گردند. اما بالشتک طبی آترین، دارای هسته های فرآوری شده و محکمی بوده و با استفاده بیشتر از آن، کیفیت آنها تنزل نمی یابد و گرد و غبار و ذرات ریز قارچ زا خارج نمی کنند.

## توجه

بالشتک طبی آترین توسط پزشکان متخصص در رشته های روماتولوژی، ارتوپدی، طب فیزیکی، آروماتراپی، زیبایی، طب سوزنی و فیزیوتراپی توصیه شده است. همچنین بالشتک طبی آترین توسط پرستاران و متخصصین ماساژدرمانی در تسکین دردهای عضلانی و بهبود حال بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

## دستورالعمل استفاده از بالشتک طبی آترین

### روش استفاده از گرما

مایکروویو: کافیت بالشتک طبی آترین را تنها به مدت ۳ دقیقه در مایکروویو با قدرت ۷۰۰ وات قرار دهید.

اجاق گاز معمولی: ابتدا بالشتک طبی آترین را داخل ظرف مخصوص نسوز در دمای حدود ۱۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت زمان ۱۵ دقیقه تحت گرما قرار داده، سپس به منظور توزیع مناسب گرما در تمام نقاط بالشتک، باگذشت نیمی از زمان مذکور آن را برگردانید.

### روش استفاده از سرما

بالشتک طبی آترین را درون یک کیسه پلاستیکی به مدت حداقل ۴۵ دقیقه در فریزر قرار دهید.


### روش شستشو

روش دستی: بالشتک طبی آترین را در آب ۴۰ درجه سانتیگراد با دست مورد شستشو قرار داده و آن را جهت خشک شدن آویزان نمایید.

ماشین لباسشویی: بالشتک طبی آترین را درون کیسه ی محافظ پارچه ای قرار داده و سپس در ماشین لباسشویی با آب حدود ۴۰ درجه سانتیگراد قرار دهید و قبل از استفاده حتما آن را خشک نمایید.

### توصیه های مهم

- از گرم کردن مجدد بالشتک طبی آترین، پیش از سرد شدن کامل آن پرهیز نمایید.
- جهت جلوگیری از خشکی بیش از حد هسته ها، گهگاه بالشتک طبی آترین را با آب مرطوب نمایید.
- محل دوخت بالشتک طبی آترین را مرتباً بررسی نمایید.

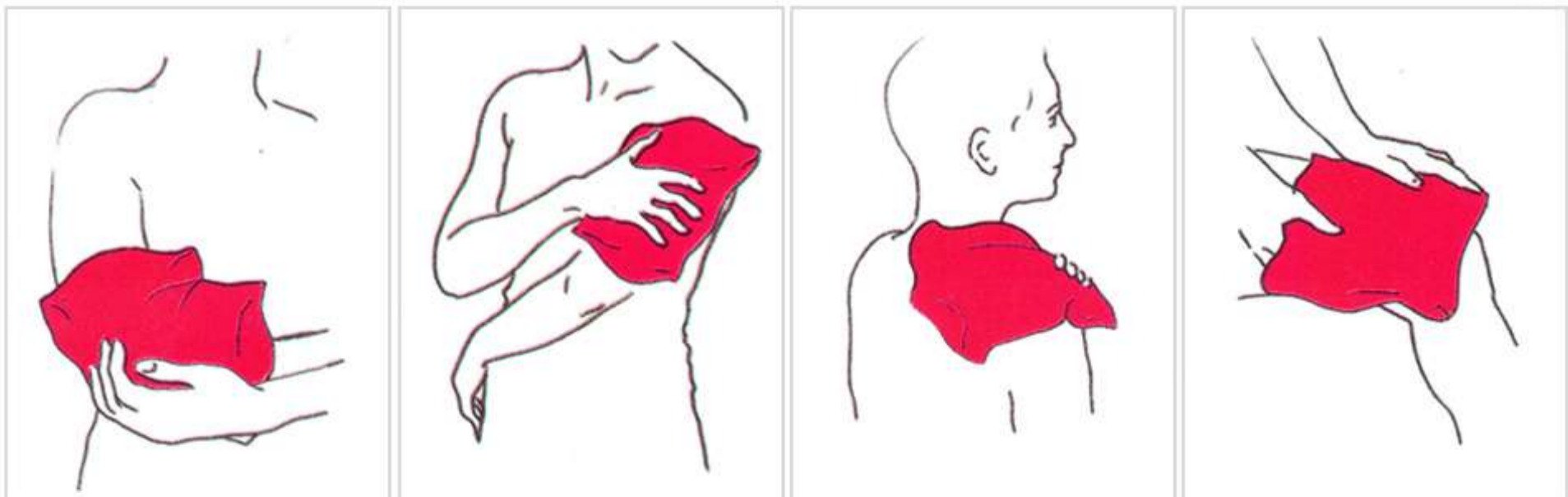

## بالشتک طبی آترین | مدل کلاسیک

اندازه ایده آل مدل کلاسیک برای استفاده آن در هر نقطه از بدن مناسب می باشد . همچنین سایز آن برای مصارف مختلف و نیز در آغوش گرفتن مناسب است . پس از یک روز سخت کاری و پراز استرس ، می توانید آن را در آغوش گرفته و یا در دستانتان بازی دهید ، لذا روشی مناسبی برای رسیدن به آرامش خواهد بود .



## بالشتک طبی آترین | مدل هلیکال

مدل هلیکال بلندتر از مدل های معمول آن ، دارای چهار بخش بوده و برای اطراف گردن یا شانه ها مناسب می باشد . شما می توانید در منزل به راحتی بالشتک طبی آترین مدل هلیکال را اطراف گردن ، زانو یا دیگر مفاصل پیچانید .



## برخی از معایب و مضرات سایر بالشتکهای مشابه

### بالشتک گندم:

خطر آتش گرفتن و ترکیدن ذرات گندم بسیار کوچک و خشک، احتمال فاسد شدن یا پوسیدگی و نیز ایجاد بوی نامطبوع در اثر رطوبت و همچنین احتمال پراکندن ذرات و عوامل قارچ زا از آن وجود دارد.

### بالشتک برنج:

خطر سوختن و ایجاد بوی نامطبوع در اثر گرم کردن بالشتک برنج و همچنین خارج شدن ذرات و عوامل قارچ زا و آلرژن از آن وجود دارد.

### پد گرمایی الکتریکی:

با توجه به برقی بودن آن، کابل های برق می توانند خطرات اتصالی و آتش سوزی و نیز برق گرفتگی به دنبال تماس با بدن را به همراه داشته باشد.

### پد گرمایی ژله ای:

می بایست در آب جوش غوطه ور شده و برای گرم شدن، به مدت زمان زیادی نیاز دارد.

### کیسه آب گرم:

نیاز به آب جوش جهت پر کردن کیسه داشته و احتمال خطرسوختگی به دنبال پر کردن کیسه، باز شدن درب کیسه یا سوراخ شدن کیسه آب گرم را به همراه دارد. همچنین با توجه به جنس لاستیکی کیسه های آب گرم، بعد از سرد شدن کیسه آب گرم خود تبدیل به یک جسم سرد آزار دهنده می شود.

#### • فروش در کلیه داروخانه ها و فروشگاه های تجهیزات پزشکی معتبر سراسر کشور

• جهت خرید با شماره تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۸۸۴۲۰۵۰۰ تماس گرفته و یا عدد ۱ را به سامانه ۱۰۰۰۰۲۰۵۰۰ پیامک کنید.

محصول گروه توسعه صنعتی آسیا | لابراتوار صنایع پزشکی آترین

تلفن کارخانه: (خط ۱۰) ۰۵۱-۳۲۶۷۳۸۵۵ فکس کارخانه: ۰۵۱-۳۲۶۷۳۴۳۰

• [www.atrinmed.com](http://www.atrinmed.com) [info@atrinmed.com](mailto:info@atrinmed.com)

• دارنده نشان استاندارد CE از اتحادیه اروپا

• دارنده گواهینامه ISO 50001 از CCPL آلمان

• دارنده گواهینامه ISO 10006 از ALLIANCE آمریکا

• دارنده گواهینامه ISO 9001 از TUV آلمان

• دارنده گواهینامه ISO 9001-2008 از NQA انگلستان